

INNOWACJA W ZAMYKANIU RAN

Cura Rapido Plus N-butyl-cyjanoakryl

toolVet®

Nowy klej na rany **Cura Rapido Plus** zapewnia doskonałe zespolenie skóry i tkanki podskórnej. W kontakcie ze skórą oraz krwią zestala się w ciągu kilkunastu sekund, tworząc wytrzymałą warstwę, uszczelniającą ranę i chroniącą przed drobnoustrojami. Utworzony, przezroczysty film jest w 100% wodoodporny, daje długotrwałe podtrzymanie dla zrostu tkanek i ulega naturalnej eliminacji w miarę zespolenia i regeneracji uszkodzonej skóry.

Cura Rapido Plus umożliwia szybkie i bardzo skuteczne łączenie tkanek przy ranach ciętych i szarpanych skóry, jak również przy zespawaniu ran na opuszkach palcowych u zwierząt. Szybkość zespolenia potwierdzona jest wieloma badaniami, maksymalny czas konieczności uciskania brzegów rany wynosi 30 sekund.

Klej nie daje odczynów zapalnych w większym stopniu niż szwy chirurgiczne.

Nie powoduje zaczerwienienia, ani ciepłoty w miejscu użycia. Dedykowany jest dla wszystkich gatunków zwierząt towarzyszących.

Klej ten został stworzony na podstawie doświadczeń i obserwacji w medycynie ludzkiej. Przyspiesza on w dużym stopniu pracę lekarza, a co najważniejsze zmniejsza traumatyzację tkanek oraz dyskomfort zwierzęcia po zabiegu chirurgicznym.

Cura Rapido Plus zapewnia psom większy komfort po zabiegach kastracji. Udowodniono mniejsze zainteresowanie raną, brak chęci do lizania czy drapania ran klejonych.



Rana szarpana na przedramieniu



Aplikacja **Cura Rapido Plus**



Rana po 7 dniach od zastosowania kleju

Cura Rapido Plus przeznaczony jest do gojenia ran, zabiegów stomatologicznych i praktyki chirurgicznej. Tworzy warstwę ochronną przez wiele dni.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA:

- Nałożenie cienkiej warstwy kleju na ranę, uciskając brzegi rany przez 30 sekund zapewniamy optymalną ochronę przed rozejściem się klejonych brzegów.
- Aplikacja kropli kleju precyzyjnie do rany po ekstrakcji zęba, natychmiastowo zatrzymuje krwawienie. Na powierzchni rany tworzy się elastyczna, aczkolwiek wytrzymała warstwa ochronna, uszczelniająca, która tamując krwawienie daje możliwość dalszej pracy w przejrzystym polu.

Get perfect with toolvet

Cura Rapido Plus

N-butyl-cyanoakryl



- **Bezbolesne zastosowanie**
- **Minimalizacja blizn**

Miejsca zastosowania kleju:

- Skóra
- Wytwory skóry – opuszki, pazury
- Jama ustna
- Na sali operacyjnej
- Jako doraźna pomoc w gabinecie lekarskim
- W apteczce właściciela

Vetfood®

toolVet®

www.toolvet.pl

Właściciel marki:
REGIS Sp. z o.o., ul. W. Sławka 3a, 30-633 Kraków
Tel.: 12 635 67 00; Fax: +48 12 635 67 02
e-mail: ekspert@vetfood.pl