

Testy diagnostyczne

Do szybkiego wykrywania chorób wirusowych



Testy oparte na metodzie immunochromatograficznej.




Skuteczność bliska 100% zapewnia pełną kontrolę nad diagnozą.



Ostateczny wynik w 10 minut daje możliwość szybkiego działania.

Jak to działa?

Metoda immunochromatograficzna

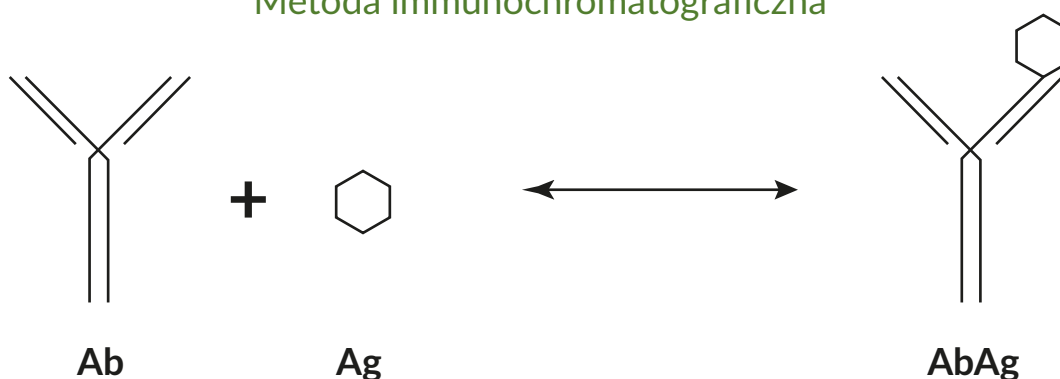


Metoda ta bazuje na powinowactwie przeciwciał monoklonalnych do antygenów.

Antygen zawarty w próbce materiału (krew, kał) przemieszcza się początkowo przez błonę nitrocelulozową dzięki zjawisku kapilarnemu.

W teście są umieszczone charakterystyczne dla danej choroby przeciwciała, najczęściej w kompleksie z cząsteczkami złota koloidalnego.

Jeśli w badanej próbce jest antygen, zwiąże się on z tym kompleksem, a na linii kontrolnej (T) pojawi się barwny pasek.

Schemat budowy testu

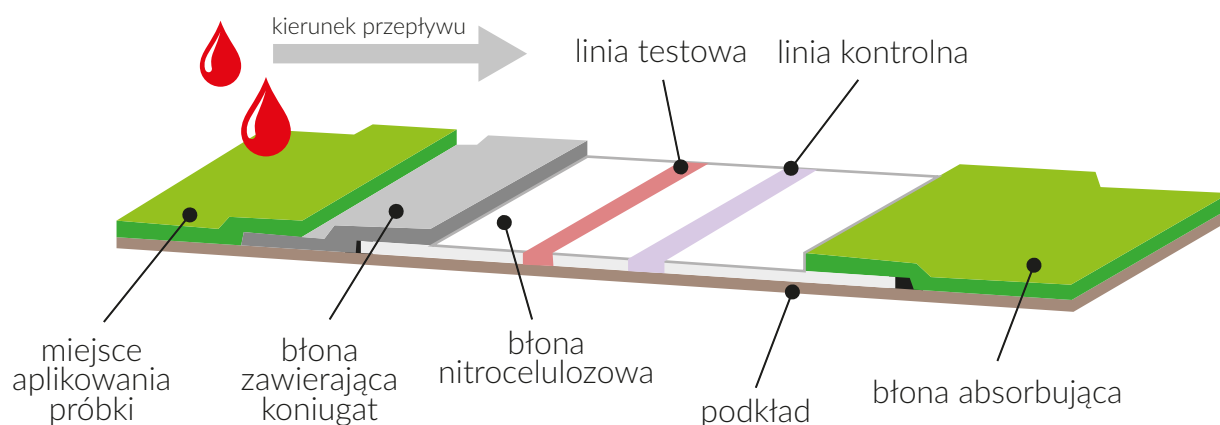

Nasza jakość



Median Diagnostics Inc. jest pierwszą firmą w Korei Południowej, która w 2001 roku uzyskała zezwolenie na produkcję materiałów diagnostycznych do stosowania u zwierząt.



21 lat doświadczenia na rynku weterynaryjnym sprawia, że testy diagnostyczne są wykonane z największą dokładnością, a produkcja prowadzona jest w sposób zrównoważony, zgodny z ISO 9001:2015



Gwarantujemy najwyższą jakość użytych materiałów, powtarzalność wyników oraz możliwość użycia do badań niezwykle małej próbki, np. wymaz z odbytu (CPV, FPV, Giardia).

W naszej ofercie są dostępne:

- Testy wykrywające **Ag GIARDIA LAMBLIA** w kale psa i kota
- Testy wykrywające **Ag PARWOWIRUSA (CPV)** w kale psa
- Testy wykrywające **Ag GIARDIA / CPV / CCV** w kale psa
- Testy wykrywające **Ag PARWOWIRUSA (FPV)** w kale kota
- Testy wykrywające **Ag BIAŁACZKI WIRUSOWEJ (FeLV)** we krwi kota
- Testy wykrywające **Ab NIEDOBORU IMMUNOLOGICZNEGO (FIV)** we krwi kota
- Testy wykrywające **Ag FeLV / Ab FIV** we krwi kota

Jakie to proste



10 minut



Krew pełna, osocze, surowica,
kał, wymaz z odbytu



5 i 10 sztuk w opakowaniu

CHOROBA	MOŻLIWE ZMIANY MORFOTYCZNE I BIOCHEMICZNE KRWI
CPV	Leukopenia, zaburzenia gospodarki elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej, hipoglikemia
CCV	Zaburzenia gospodarki elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej, hipoglikemia
FPV	Limfopenia, neutropenia, następnie trombocytopenia i niedokrwistość
FeLV	Skaza krwotoczna, trombocytopenia, białaczka szpikowa i limfatyczna, silna niedokrwistość
FIV	Neutropenia, niedokrwistość

NAZWA TESTU	BADANY MATERIAŁ	CZUŁOŚĆ TESTU	SPECYFICZNOŚĆ TESTU	SPOSÓB ZAKAŻENIA	OBJAWY ZAKAŻENIA
 Giardia Lamblia	kał	97,1%	96,5%	LAMBLIOZA Zakażenie następuje w procesie zjedzenia cyst, które mogą znajdować się na wszystkim co ma styczność ze skażonym kałem chorych zwierząt. Pierwotniak bytuje w przewodzie pokarmowym żywiciela, głównie dwunastnicy i pęcherzyku żółciowym.	• silne biegunki, • bóle brzucha, • wymioty, • wychudzenie, • złe przybieranie na masie młodych, • gorączka.
 CPV	kał	98,1%	100%	PARWOWIROZA Zakażenie następuje poprzez kontakt psów z wydaliniami i wydzielinami chorych zwierząt, jak: kał, wymiociny, ślina, mocz. Wirus jest wysoce odporny na czynniki zewnętrzne i dezynfekcję, dlatego szybko się rozprzestrzenia także przy pomocy skażonych przedmiotów czy ubrań lekarskich.	• silne i krwiste biegunki, • osowiałość, • osłabienie, • brak apetytu, • niechęć do picia wody, • początkowo wysokie gorączki, w dalszym procesie hipotermia z wycieńczenia.
 CCV	kał	94,9%	97,5%	KORONAWIROZA Zakażenie następuje poprzez kontakt psów z wydaliniami i wydzielinami chorych zwierząt, jak: kał, wymiociny, ślina, mocz. Choroba najczęściej ogranicza się do przewodu pokarmowego, wirus wywołuje zapalenie jelit.	• ostre, krwotoczne biegunki, • osowiałość, • osłabienie, • brak apetytu, • wymioty, • gorączka powyżej 39°C.
 FPV	kał	97,4%	98,4%	PANLEUKOPENIA Zakażenie następuje poprzez kontakt kotów z wydaliniami i wydzielinami chorych zwierząt, jak: kał, wymiociny, mocz. Wirus jest wysoce odporny na czynniki zewnętrzne i dezynfekcję, dlatego rozprzestrzenia się przy pomocy przedmiotów użytkowych. Trzęcie wrota stanowią zakażenia wektorowe, przez pchły i wszy. Wirus wywołuje zapalenie jelit z leukopenią w obrazie krwi.	• osłabienie, • apatia, • brak apetytu, • niechęć do picia wody, • cuchnąca, krwista biegunka, • młody wiek pacjenta.
 FeLV	krew	100%	100%	WIRUSOWA BIAŁACZKA KOTÓW Zakażenie następuje poprzez wymianę płynów ustrojowych, jak: krew, ślina, nasienie, mocz, mleko, a także przez łożysko. Wirus jest bardzo niestabilny w środowisku zewnętrznym, stąd zakażenie odbywa się przez kontakt bezpośredni, najczęściej walki dzikich kotów, akty seksualne. Choroba jest groźna i nieuleczalna.	• spadek masy ciała, • powiększenie węzłów chłonnych, • niedokrwistość – bledność bł. śluzowych, • podatność na infekcje górnych dróg oddechowych, • podatność na zapalenia w obrębie skóry, • brak apetytu, • gorączka.
 FIV	krew	96,8%	98,8%	ZESPÓŁ NIEDOBORU IMMUNOLOGICZNEGO KOTÓW Zakażenie następuje poprzez wymianę płynów ustrojowych, jak: krew, ślina, nasienie, mocz, mleko, a także przez łożysko. Wirus jest bardzo niestabilny w środowisku zewnętrznym, stąd zakażenie odbywa się przez kontakt bezpośredni, najczęściej walki dzikich kotów, akty seksualne. Choroba jest groźna i nieuleczalna.	• przewlekłe powiększone węzły chłonne, • zmiany zapalne w obrębie jamy ustnej, • nawracające, trudne w leczeniu infekcje, • gorączka.

Marka **toolVet**[®]

toolVet powstał w 2021 roku z myślą o potrzebach lekarzy weterynarii, jako nowa linia produktowa firmy **Regis**, która od 2008 roku tworzy niezawodną markę **Vetfood**.


Każdego dnia nasz zespół pracuje nad portfolio, by zapewnić lekarzom komfort i większą efektywność na sali operacyjnej, jak i w gabinecie lekarskim.

Obecnie możemy zaoferować najwyższej jakości materiały szewne oraz innowacyjny klej tkankowy Cura Rapido Plus.

Wkrótce w sprzedaży

Testy na choroby odkleszczowe:

- Test wykrywający **Ab Anaplasma** we krwi psa
- Test wykrywający **Ab Borrelia burgdorferi** we krwi psa
- Test wykrywający **Ab Erlichia canis** we krwi psa
- Test wykrywający **Ab Erlichia/Borrelia/Anaplasma COMBO**

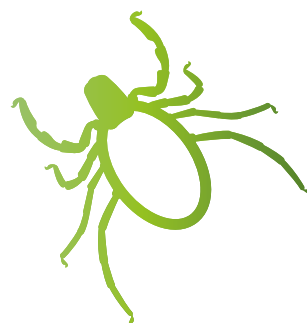

Vetfood[®]

Właściciel marki REGIS Sp. z o.o.,
ul. W. Sławka 3a, 30-633 Kraków, Poland
Tel.: + 48 12 635 67 00;
Fax: +48 12 635 67 02
e-mail: info@vetfood.pl